

**ZiNIQ<sup>+</sup>**

wyrób medyczny  
**Woda  
morska  
izotoniczna**

### Instrukcja używania

#### **ZiNIQ<sup>+</sup> Woda morska izotoniczna 30 ml. Wyrób medyczny.**

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu ZiNIQ<sup>+</sup> Wody morskiej izotonicznej, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

ZiNIQ<sup>+</sup> Woda morska izotoniczna jest izotonicznym roztworem wody morskiej, który nawilża suchą śluzówkę nosa. Stosuje się ją pomocniczo w czasie nieżyty nosa, zapalenia zatok oraz kataru siennego, łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii oraz do codziennej higieny i oczyszczenia nosa.

**Ilość składników aktywnych w 1 dozowaniu (0,1 ml):** Woda morska z głębin Oceanu Atlantyckiego 0,028 ml.

**Pozostałe składniki:** Woda demineralizowana 0,072 ml.

**Postać preparatu:** Wyrób medyczny ZiNIQ<sup>+</sup> Woda morska izotoniczna występuje w postaci sprayu (płynu zawierającego aplikator do nosa) umieszczonego w butelce o pojemności 30 ml (około 300 dawek).

#### **Zastosowanie:**

Wyrób medyczny ZiNIQ<sup>+</sup> Woda morska izotoniczna może być stosowany wspomagająco w:

- profilaktyce i wsparciu leczenia objawów nieżyty nosa
- codziennej pielęgnacji nosa
- nawilżaniu wysuszonej błony śluzowej nosa.

#### **Wskazania:**


Produkt jest przeznaczony dla dorosłych, dzieci i niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.

**Przeciwwskazania i środki ostrożności:** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu. Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. Nie należy używać po upływie terminu ważności.

**Sposób użycia:** Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Po każdym stosowaniu oczyścić końcówkę wodą i mydłem, a następnie optukać i osuszyć.

- Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci: 1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.
- Dorośli: 1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.

**Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.








 **PRODUCENT:**  
GLOBAL PHARMA CM  
SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Berezów 49A  
26-130 Suchedniów, Polska

**DYSTRYBUTOR:**  
TITLIS Sp. z o.o.  
ul. H. Kamieńskiego 51  
30-644 Kraków  
www.ziniq.pl

 **WYRÓB MEDYCZNY**

Data opracowania  
instrukcji używania: 08/2021

#### WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SYMBOLI:

- |  |  |
|--|--|
|  CHRONIĆ PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH         |  <b>LOT</b> NUMER SERII PRODUKTU |
|  KONIECZNOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z DOŁĄCZONĄ DO WYROBU INSTRUKCJĄ UŻYCIA |  DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU          |
|  ZAKRES TEMPERATUR PRZECHOWYWANIA                                   |  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA NORM UE |
|  PRODUCENT   |  |